

Інструкція

Обробка та зберігання біологічного матеріалу

Весь матеріал, який доставляється в лабораторію на дослідження, повинен бути промаркований у відповідності з направленням.

У супровідній записці до матеріалу, необхідно вказувати:

***ПІБ пацієнта,
дату взяття матеріалу,
номер (код) замовлення,
дату народження пацієнта (для дітей - рік і місяць народження),
мета дослідження,
можливий діагноз.***

При дослідженні гормонів репродуктивної панелі в направленні необхідно вказувати ***день менструального циклу (тривалість менопаузи)***, або термін вагітності.

При цитологічному дослідженні на атипові клітини або аналізі на мікрофлору в направленні необхідно вказувати, крім дня менструального циклу (тривалості менопаузи), також ***передбачуваний діагноз.***

При проведенні пренатальної діагностики обов'язково потрібно вказувати ***термін вагітності*** (для дослідження PAPP необхідно також вказувати вагу). За відсутності місячних або при менопаузі дається інформація, коли був день менструального циклу або тривалість менопаузи.

При дослідженні аналізу сечі на цукор необхідно вказувати обсяг (кількість) зібраної сечі за добу.

Всі аналізи, які вимагають відбору сироватки (гормони, онкомаркери, антитіла, біохімія і т.д.), повинні набиратися в спеціальні пробірки-моновети з активатором згустку. ***Після забору крові пробірки-моновети відстоюються при кімнатній температурі (15-20° C) до повного утворення згустку. По закінченні утворення згустку, пробірки-моновети необхідно центрифугувати на центрифугі протягом 15 хвилин при 1000 оборотів в хвилину.***